

TRIX - lasso przyrząd do usuwania kleszczy



Cena: 24,99 pln

Opis słownikowy

Producent	Karo Pharma
Rejestracja	Wyrób medyczny
Zastosowanie	przeciw kleszczom

Opis produktu

Trix™ to przyrząd do usuwania kleszczy u ludzi i zwierząt, którego działanie przypomina lasso oplatające się wokół kleszcza w niezauważalny dla niego sposób, co pozwala go sprawnie i bezpiecznie usunąć.

Produkt jest odpowiedni także w przypadku poczwarek kleszcza.

Trix™ jest prosty w obsłudze i efektywny w działaniu, umożliwia skuteczne usunięcie pasożyta w warunkach domowych.

Właściwości:

- działanie oparte na zasadzie lassa
- zalecany przez lekarzy i weterynarzy
- usuwa pasożyta w całości
- szybki i prosty w obsłudze
- bezbolesny i delikatny w użyciu
- pozwala na usunięcie pasożyta z trudno dostępnych miejsc
- pętla lassa wykonana z włókna węglowego o dużej wytrzymałości

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Usuwanie kleszczy nigdy nie było tak proste i pewne!



1. Nacisnąć przycisk i umieścić wysuniętą pętelkę wokół pasożyta, możliwie jak najbliżej skóry.
2. Zwolnić przycisk i lekko docisnąć skórę końcówką przyrządu, aby lepiej uchwycić pajęczaka.
3. Trzymając przyrząd prostopadłe do skóry, wyciągnąć lub wykręcić kleszcza w dowolnym kierunku.

Producent:
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sweden

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar