

UrgoStart Contact opatrunek kontaktowy 10x12cm - 1 szt.

Cena: 44,30 pln



Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

UrgoStart Contact to miękki i elastyczny opatrunek kontaktowy, który łatwo dopasowuje się do rany, jest zbudowany z macierzy gojącej TLC-NOSF, dzięki czemu znacząco skraca czas leczenia rany.

Wskazania:

- niezainfekowane rany przewlekłe: owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny
- rany głębokie lub nietypowo usytuowane, także podczas odprowadzania wysięku z ran głębokich
- w leczeniu niegojących się ran ostrych
- leczenia ran otoczonych tzw. "skórą pergaminową"

Właściwości:

- dzięki macierzy gojącej TLC-NOSF skraca czasu leczenia
- utrzymuje optymalnie wilgotnego środowiska sprzyjającego procesowi gojenia ran
- nie przywiera do rany, zalecany do stosowania w leczeniu ran otoczonych tzw. "skórą pergaminową"
- bezbolesna i bezurazowa zmiana
- nie powoduje uszkodzeń nowo powstałych tkanek
- duża elastyczność ułatwiająca aplikację nawet na rany trudno dostępne

Sposób aplikacji:

Oczyścić ranę przy zachowaniu obowiązujących procedur. Jeśli wcześniej użyty został antyseptyk ranę ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.

Zdjąć z opatrunku folię ochronną i przyłożyć go bezpośrednio do rany.

Produkt można dociąć według indywidualnych potrzeb, tak aby był 1-2 cm większy od brzegów rany.

UrgoStart Contact wymaga zastosowania opatrunku wtórnego, który dopasowuje się w oparciu o lokalizację rany i stopień wysięku, mogą to być opatrunki piankowe UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.



Kompleksowe zaopatrzenie od 1997 r.

dlpacjenta.pl

Internetowy Sklep Medyczny i Zielarski

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlpacjenta.pl

Rozmiar: 10x12 cm