

UrgoStart Plus Border opatrunek skracający czas leczenie ran 12x12 - 1 szt.

Cena: 53,85 pln



Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Samoprzylepny opatrunek chłonny wskazany do stosowania na rany bez cech infekcji. Wyrób zbudowany jest z macierzy gojącej TLC-NOSF i włókien poliabsorbentu (poliakrylanu). Wykazuje działanie oczyszczające i wpływa na znaczne skrócenia czasu leczenia rany (nawet o 100 dni).

Wskazania:

- rany bez cech infekcji, z wysiękiem, w każdej z faz gojenia ran (od fazy oczyszczania z martwicy rozpylonej do całkowitego wyleczenia)
- rany przewlekłe: owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny
- nieogójące się rany ostre

Właściwości:

- dzięki technologii TLC-NOSF skraca czas gojenia rany
- dzięki włóknom poliabsorbentu oczyszcza ranę z martwicy rozpylonej, wysięku i obumarłych tkanek
- tworzy i utrzymuje optymalnie wilgotne, sprzyjającego procesowi gojenia środowiska w ranie
- tamuje niewielkie krwawienia
- umożliwia bezbolesne, bezurazowe zdejmowanie opatrunku
- oddychająca, wodoodporna warstwa zewnętrzna umożliwia stosowanie opatrunku przy krótkim kontakcie z wodą
- dzięki wysokiej chłonności nie ma potrzeby stosowania opatrunku wtórnego
- łatwy w mocowaniu dzięki samoprzylepnym, silikonowym brzegom

Sposób aplikacji:

Oczyszczyć ranę postępując z godnie z miejscowymi procedurami.

Jeśli wcześniej użyto środka antyseptycznego, przed założeniem opatrunku ranę przepłukać solą fizjologiczną.

Osuszyć i odłuszczyć skórę wokół rany w celu zwiększenia przyczepności opatrunku.

Zdjąć z opatrunku folię ochronną i przyłożyć go bezpośrednio na ranę.

Opatrunek posiada kompres z wysokochłoną warstwą absorbującą wysięk, której nie należy przecinać. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, przycinać można samoprzylepne brzegi opatrunku.

Jeśli zostało to zalecone wyrób można stosować pod bandażem uciskowym.

Opatrunek UrgoStart Plus Border należy zmieniać co 1-2 dni w fazie oczyszczania rany z martwicy rozpuszczalnej. W kolejnych fazach - zależnie od objętości wysięku i stanu klinicznego rany. Produkt może pozostawać na ranie przez maksymalnie 7 dni.

Rozmiar: 12x12 cm