

# UrgoStart Plus Pad opatrunek skracający czas leczenia ran 15x20cm - 1 szt.

Cena: 84,35 pln



## Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

UrgoStart Plus Pad to zbudowany z macierzy gojącej TLC-NOSF i włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) opatrunek o dużym rozmiarze wykazujący działanie oczyszczające i skracający czas leczenia (nawet o 100 dni) odpowiedni do stosowania na większe rany.

### Wskazania:

- rany przewlekłe np. owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny
- niegojące się rany ostre
- na rany bez cech infekcji, z wysiękiem, w każdej z faz gojenia ran (począwszy od fazy oczyszczania z martwicy rozpułwnej aż do całkowitego wyleczenia)

### Właściwości:

- skraca czas gojenia i leczenia rany dzięki technologii TLC-NOSF
- utrzymuje i tworzy w ranie sprzyjające procesowi gojenia optymalnie wilgotne środowisko pobudzające działanie najważniejszych komórek biorących udział w procesie gojenia
- oczyszcza ranę z martwicy rozpułwnej, wysięku oraz obumarłych tkanek dzięki włóknom poliabsorbentu
- wchłania wysięk wertykalnie i zatrzymuje go w swojej strukturze
- tamuje niewielkie krwawienia
- umożliwia bezurazowe zdejmowanie w całości i zmianę opatrunku
- dzięki miękkości i dopasowywaniu się do rany jest wygodny i praktyczny w zastosowaniu
- chroni skórę wokół rany

### Sposób aplikacji:

Ranę oczyścić zgodnie z procedurami. Gdy wcześniej zastosowano antyseptyk, przed założeniem opatrunku ranę ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.

Zdjąć z opatrunku folię i przyłożyć go bezpośrednio na ranę. Opatrunek można przyciąć tak aby był ok. 1-2 cm większy od brzegów rany.

Opatrunek w trakcie fazy oczyszczania rany z martwicy rozpułwnej należy wymieniać co 1-2 dni, następnie w zależności od objętości

wysięku i stanu klinicznego rany. Maksymalny czas przez jaki może pozostać na ranie wynosi do 7 dni.

Opatrunek UrgoStart Plus pad wymaga zastosowania opatrunku wtórnego. W zależności od lokalizacji rany i poziomu wysięku może to być UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.

**Rozmiar:** 15x20 cm