

## UrgoTul Absorb opatrunek piankowy 10x10cm - 1 szt.



Cena: 13,95 pln

### Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

UrgoTul Absorb to opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z wkładką chłonną z pianki poliuretanowej i włókninowego, ochronnego podłoża poliuretanowego odpowiedni do stosowania na rany z umiarkowanym lub dużym wysiękiem.

#### Wskazania:

- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej
- rany ostre: oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe, rany pooperacyjne
- miejscowe leczenie ran grzybiczych w skojarzeniu z leczeniem przeciwgrzybiczym

#### Właściwości:

- dzięki warstwie TLC zapewnia optymalną rekonstrukcję skóry właściwej i naskórka
- stymuluje proliferację fibroblastów
- pozwala na kontrolę wysięku rany (chłonność umiarkowana do wysokiej)
- pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- dzięki żelującej matrycy TLC, utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko
- może pozostawać na ranie przez okres do 7 dni - mniej zmian opatrunków zmniejsza zakłócenia w gojeniu się rany
- chroni skórę wokół rany (opatrunek zapewnia absorpcję wertykalną bez przeciekania bocznego, co zabezpiecza przed wystąpieniem maceracji)
- nie przywiera do rany
- jest łatwy w aplikacji (pozostaje na miejscu po nałożeniu)
- przebadany klinicznie

#### Sposób aplikacji:

Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. W przypadku użycia wcześniej antyseptyku, przed założeniem opatrunku ranę ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.

Z opatrunku zdjąć folię ochronną i miękką, przylegającą strona przyłożyć go bezpośrednio na ranę. Opatrunek można przyciąć tak aby był ok. 1-2 cm większy od brzegów rany.

Opatrunek zabezpieczyć przylepcem lub bandażem.

W zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany należy wymieniać co 2-4 dni. W zależności od stanu rany, maksymalny czas przez jaki opatrunek może pozostać na ranie wynosi do 7 dni.

Opatrunek może być stosowany jako opatrunek wtórny na ranę opatrzoną opatrunkiem UrgoTul Ag/Silver.

**Rozmiar:** 10x10 cm