

Wanna pneumatyczna do mycia pacjenta w łóżku Timago Easy Bath



Cena: 219,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Timago
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Przenośna nadmuchiwana wanna pneumatyczna wykonana z winylu przeznaczona do użytku zwłaszcza w warunkach domowych w pielęgnacji osób z deficytem ruchowym, starszych i obłożnie chorych.

Produkt posiada podwójne komory powietrzne zabezpieczające przed wylaniem wody i mydlin.

Wanna pozwala w łatwy i prosty sposób dbać o higienę pacjenta oraz prowadzić profilaktykę odleżynową osób z deficytem ruchowym, po przebytym wylewie, udarze, czy w przypadku niepełnosprawności ruchowej, obłożnie chorych i osób starszych.

Wyrób opracowano tak aby bez trudności i konieczności przejścia do łazienki umyć chorego w jego łóżku w pozycji leżącej, także gdy nie ma możliwości umycia go w łazience.

Sposób użycia:

1. Umieścić pacjenta w wannie.
2. Przy użyciu pompki napompować wannę i zamknąć zawór odpływowy znajdujący się jej dnie.
3. Napęlić wannę ciepłą wodą o temperaturze poniżej 50°C.
4. Umyć pacjenta.
5. Po umyciu pacjenta otworzyć zawór odpływowy i opróżnić wannę.
6. Wypuścić powietrze przez zawór pompki i przenieść pacjenta.
7. Wysuszyć wannę przed schowaniem.

Konserwacja i zastrzeżenia:

Po użyciu oczyścić wszystkie części zestawu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nie należy przechowywać zestawu w wysokiej temperaturze i wilgotnym środowisku.

Nie narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie wystawiać na bezpośredni kontakt z ostrymi przedmiotami.

Kontrolować temperaturę wody, aby uniknąć poparzeń.

Nie używać detergentów, rozpuszczalników ani olejków eterycznych.

Nie wystawiać pompki na kontakt z wodą.

Czas pracy pompki nie powinien przekraczać 20 minut z 15 minutowymi przerwami. Nie używać pompki podczas użytkowania wanny.

Wymiary zewnętrzne wanny: 190 x 90 cm

Wysokość: 22 cm

Pojemność: 35 litrów

Waga: 2 kg

Waga pompki: 0,20 kg

Pobór mocy: 150W

Zawartość zestawu:

- wanna
- pompka
- łatka naprawcza
- instrukcja obsługi

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar