

Żelowa opaska chłodząca na oczy Pakcare

Cena: 65,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opaska chłodząco-grzejąca na oczy będąca praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie. Idealnie sprawdza się przy bólach głowy, migrenach, bólu i zmęczeniu oczu spowodowanym długotrwałą pracą przy komputerze.

Produkt ma uniwersalny rozmiar. Wykonany został z solid gelu (hydrożelu) delikatnego i elastycznego materiału kompresyjnego, który dopasowuje się do kształtu twarzy, zapewniając równomierne działanie, wygodę i komfort użytkowania.

Opaska dobrze przylega do twarzy i przyciemnia, dzięki czemu sprawdza się w przypadku nadwrażliwości na światło towarzyszącej bólowi głowy i migrenom.

Zaletą opaski jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości.

Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, opaska pomaga rozluźnić mięśnie wokół oczu i poprawić krążenie, natomiast działanie chłodzące sprzyja w zmniejszeniu opuchlizny i obrzęków pod oczami oraz przynosi ulgę w bólu.

Wskazania:

Jako kompres chłodzący:

- łagodzenie bólu głowy i migreny
- zmęczenie po długotrwałej pracy przy komputerze
- uczucie przegrzania lub zaczerwienienia oczu
- opuchlizna wokół oczu
- w celu odprężenia i odświeżenia oczu po wysiłku

Jako kompres grzejący:

- łagodzenie zespołu suchego oka
- poprawa krążenia w okolicy oczu
- napięcie mięśni wokół oczu i czoła
- odprężenie i relaksacja oczu po stresie lub zmęczeniu

Właściwości:

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Elastyczny materiał dopasowujący się do ciała
- Łatwość i komfort użytkowania
- Uniwersalny rozmiar

Zastosowanie:

Jako produkt chłodzący:

1. Umieścić opaskę w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Nałożyć opaskę na głowę, dopasowując ją tak, by dobrze przylegała.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

Jako produkt grzejący:

1. Podgrzać opaskę w kuchence mikrofalowej (ok. 15-25 sekund) - czas zależny jest od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się, że nie jest zbyt wysoka.
3. Nałożyć opaskę na głowę, dopasowując ją tak, by dobrze do niej przylegała.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

Środki ostrożności:

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

Specyfikacja:

- Rozmiar: 21 x 11 cm
- Waga: 140 g
- Materiał: soild gel 8 mm – delikatny i elastyczny materiał kompresyjny

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

