

Żelowy czepek chłodzący Pakcare - pełny



Cena: 65,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Czepek chłodząco-grzejący będący praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie. Idealnie sprawdza się przy gorączce, bólach głowy, migrenach, napięciu karku czy po intensywnym dniu dostarczającym stresu.

Produkt dobrze przylega do głowy i jest nieprzepuszczalny dla światła, dzięki czemu sprawdza się w przypadku nadwrażliwości na światło towarzyszącej bólom głowy i migrenom. Uniwersalny rozmiar i delikatny, elastyczny, kompresyjny materiał z jakiego jest wykonany - solid gelu (hydrogelu) zapewnia dobre dopasowanie do kształtu i wielkości głowy oraz wygodę i komfort użytkowania.

Zaletą opaski jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości. Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, czepek sprawdzić się może także w chłodne wieczory lub wsparcie terapii ciepłych. Jego działanie chłodzące można wykorzystać również podczas chemioterapii, w celu ograniczenia wypadania włosów.

Wskazania:

- Obrzęki i urazy - jako zimny okład redukujący opuchliznę i wspierający regenerację.
- Migrena i bóle głowy - okład chłodzący pomagający złagodzić ból i napięcie, przynoszący szybką ulgę w bólu
- Gorączka - jako zimny okład pomaga obniżyć temperaturę ciała
- Zatoki - terapia ciepłem wspiera udrożnienie i łagodzi dyskomfort przy stanach zapalnych zatok

Właściwości:

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Elastyczny materiał dopasowujący się do ciała
- Łatwość i komfort użytkowania
- Uniwersalny rozmiar

Zastosowanie:

Jako produkt chłodzący:

1. Umieścić opaskę w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Nałożyć opaskę na głowę, dopasowując ją tak, by dobrze do niej przylegała.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

Jako produkt grzejący:

1. Podgrzać opaskę w kuchenie mikrofalowej (ok. 35-45 sekund) - czas zależny jest od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się, że nie jest zbyt wysoka.
3. Nałożyć opaskę na głowę, dopasowując ją tak, by dobrze do niej przylegała.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

Środki ostrożności:

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

Specyfikacja:

- Wymiary na płasko: 21 x 22 cm
- Rozmiar: 59 x 14,5 cm
- Waga: 770 g
- Materiał: soild gel 8 mm – delikatny i elastyczny materiał kompresyjny

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

