

Żelowy kompres chłodząco-grzejący 15x15cm Pakcare

Cena: 15,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Kompres chłodząco-grzejący będący praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie.

Produkt idealnie sprawdza się w przypadku bólu, urazów i obrzęków pooperacyjnych lub pourazowych także w przypadku uczucia napięcia, przeciążenia mięśni po wysiłku fizycznym, treningu lub w przypadku bólu reumatycznego i zwyrodnieniowego.

Zaletą kompresu jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości.

Kompres ma rozmiar 15 x 15 cm, dzięki czemu sprawdzi się na mniejszych partiach ciała. Wypełniony jest hydrożelem, który równomiernie rozkłada się i dopasowuje do miejsca, na którym jest stosowany.

Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, opaska pomaga rozluźnić mięśnie i poprawić krążenie, natomiast działanie chłodzące sprzyja w zmniejszeniu opuchlizny i obrzęków np. po urazach lub przebytych zabiegach chirurgicznych.

Wskazania:

Jako kompres chłodzący:

- stany zapalne stawów i ścięgien
- obrzęki i opuchlizna
- łagodzenie bólu pourazowego i pooperacyjnego
- urazy sportowe i przeciążenia
- zmniejszenie napięcia mięśni i dyskomfortu

Jako kompres grzejący:

- rozluźnienie mięśni po wysiłku lub treningu

- poprawa krążenia
- przewlekłe bóle zwyrodnieniowe i reumatyczne
- sztywność i napięcie mięśni
- wspomaganie regeneracji po urazach, intensywnym treningu lub pracy

Właściwości:

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Łatwość i komfort użytkowania
- Praktyczne i uniwersalne rozwiązanie

Zastosowanie:

Jako produkt chłodzący:

1. Umieścić kompres w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Przyłożyć kompres do miejsca wymagającego schłodzenia.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

Jako produkt grzejący:

1. Podgrzać kompres w kuchence mikrofalowej (ok. 15-25 sekund) - czas zależy od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się, że nie jest zbyt wysoka.
3. Przyłożyć kompres do miejsca wymagającego ogrzania.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

Środki ostrożności:

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

Specyfikacja:

- Rozmiar: 15 x 15 cm
- Waga: 200 g
- Materiał wewnątrz: hydrożel 8 mm
- Materiał zewnątrz: nylon, spandex

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

