

# Żelowy kompres chłodząco-grzejący 28x11cm Pakcare

Cena: 19,99 pln



## Opis słownikowy

|             |                |
|-------------|----------------|
| Producent   | Balanssen      |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

## Opis produktu

Kompres chłodząco-grzejący będący praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie.

Produkt idealnie sprawdza się w przypadku bólu, urazów i obrzęków pooperacyjnych lub pourazowych także w przypadku uczucia napięcia, przeciążenia mięśni po wysiłku fizycznym, treningu lub w przypadku bólu reumatycznego i zwyrodnieniowego.

Zaletą kompresu jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości.

Kompres ma rozmiar 28 x 11 cm, dzięki czemu sprawdzi się do przyłożenia wokół np. ręki. Wypełniony jest hydrożelem, który równomiernie rozkłada się i dopasowuje do miejsca, na którym jest stosowany.

Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, opaska pomaga rozluźnić mięśnie i poprawić krążenie, natomiast działanie chłodzące sprzyja w zmniejszeniu opuchlizny i obrzęków np. po urazach lub przebytych zabiegach chirurgicznych.

### Wskazania:

#### Jako kompres chłodzący:

- stany zapalne stawów i ścięgien
- łagodzenie bólu pourazowego i pooperacyjnego
- obrzęki i opuchlizna
- zmniejszenie napięcia mięśni i dyskomfortu
- urazy sportowe i przeciążeniowe

#### Jako kompres grzejący:

- sztywność i napięcie mięśni

- rozluźnienie mięśni po wysiłku lub treningu
- przewlekłe bóle zwyrodnieniowe i reumatyczne
- poprawa krążenia
- wspomaganie regeneracji po urazach, intensywnym treningu lub pracy

**Właściwości:**

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Łatwość i komfort użytkowania
- Praktyczne i uniwersalne rozwiązanie

**Zastosowanie:**

**Jako produkt chłodzący:**

1. Umieścić kompres w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Przyłożyć kompres do miejsca wymagającego schłodzenia.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

**Jako produkt grzejący:**

1. Podgrzać kompres w kuchenie mikrofalowej (ok. 20-30 sekund) - czas zależny jest od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się, że nie jest zbyt wysoka.
3. Przyłożyć kompres do miejsca wymagającego ogrzania.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

**Środki ostrożności:**

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

**Specyfikacja:**

- Rozmiar: 28 x 11 cm
- Waga: 300 g
- Materiał wewnątrz: hydrożel 8 mm
- Materiał zewnątrz: nylon, spandex

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

**Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar**

*Producent i osoba odpowiedzialna w UE:*

*Bifarm Sp. z o.o.*

*ul. Żurawia 71*

*15-540 Białystok*

*Polska*

*[info@bifarm.pl](mailto:info@bifarm.pl)*

## Galeria

