


Żelowy kompres chłodząco-grzejący 30x20cm Pakcare

Cena: 29,99 pln

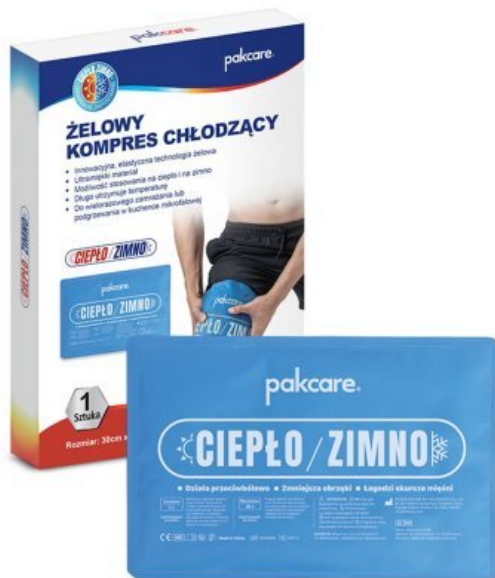

Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Kompres chłodząco-grzejący będący praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie.

Zaletą produktu jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości.

Kompres ma duży rozmiar 30 x 20 cm, dzięki czemu sprawdzi się do stosowania na większe partie ciała. Wypełniony jest hydrożelem, który równomiernie rozkłada się i dopasowuje do miejsca, na którym jest stosowany.

Produkt idealnie sprawdza się w przypadku bólu, urazów i obrzęków pooperacyjnych lub pourazowych także w przypadku uczucia napięcia, przeciążenia mięśni po wysiłku fizycznym, treningu lub w przypadku bólu reumatycznego i zwyrodnieniowego.

Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, opaska pomaga rozluźnić mięśnie i poprawić krążenie, natomiast działanie chłodzące sprzyja w zmniejszeniu opuchlizny i obrzęków np. po urazach lub przebytych zabiegach chirurgicznych.

Wskazania:

Jako kompres chłodzący:

- urazy sportowe i przeciążeniowe
- łagodzenie bólu pourazowego i pooperacyjnego
- stany zapalne stawów i ścięgien
- zmniejszenie napięcia mięśni i dyskomfortu
- obrzęki i opuchlizna

Jako kompres grzejący:

- sztywność i napięcie mięśni

- poprawa krążenia
- wspomaganie regeneracji po urazach, intensywnym treningu lub pracy
- rozluźnienie mięśni po wysiłku lub treningu
- przewlekłe bóle zwyrodnieniowe i reumatyczne

Właściwości:

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Łatwość i komfort użytkowania
- Praktyczne i uniwersalne rozwiązanie

Zastosowanie:

Jako produkt chłodzący:

1. Umieścić kompres w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Przyłożyć kompres do miejsca wymagającego schłodzenia.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

Jako produkt grzejący:

1. Podgrzać kompres w kuchenie mikrofalowej (ok. 35-45 sekund) - czas zależny jest od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się, że nie jest zbyt wysoka.
3. Przyłożyć kompres do miejsca wymagającego ogrzania.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

Środki ostrożności:

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

Specyfikacja:

- Rozmiar: 30 x 20 cm
- Waga: 600 g
- Materiał wewnątrz: hydrożel 8 mm
- Materiał zewnątrz: nylon, spandex

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

*Bifarm Sp. z o.o.
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
Polska
info@bifarm.pl*

Galeria

